



## FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: **FILTRO BACTERIAL Y VIRAL ADULTO**

MODELO: **MY-RGB-Z-X**

MARCA COMERCIAL: **VENOMEDIC.**

REGISTRO SANITARIO: **DM31105E**

### 1. DESCRIPCIÓN:

Los filtros BV tienen un papel esencial en los pacientes sometidos a ventilación mecánica reduciendo el riesgo de contaminación cruzada .


El uso de filtros protege a los pacientes, al prevenir la inhalación de patógenos dañinos, ayuda a proteger los ventiladores de la contaminación con bacterias y virus y ayuda a prevenir la propagación de la infección en el ambiente hospitalario

### 2. CARACTERÍSTICAS:

Descripción	Filtro Bacterial Viral (BV FILTER)
	*Filtro Bacterial Viral (BV FILTER with catheter mount) con Catéter mount
Material	Carcasa de ABS, membrana filtrante hidrofóbica de polipropileno electrostático + PP
Retorno de humedad	N/A
Eficiencia de filtración	99.999% (Eficacia de filtración bacterial) BFE
	99.99% (Eficacia de filtración viral).VFE
Resistencia @ 60 LPM	$\leq 2.5 \text{ cm H}_2\text{O}$ ( $\leq 0.245 \text{ kPa}$ )
Espacio muerto del filtro	32ml
Rango de Volumen Tidal	250-1500ml
Conectores	22M/15F-22F/15M
Peso	Del filtro: 27gr (+/- 3g)
	Del corrugado: 16g (+/-3g)
Puerto de Monitoreo Luer de CO <sub>2</sub>	Si
*Catéter mount (Corrugado)	Tubo plegable
*Conector para catéter mount	22M/15F-22F

## HOUSE MEDICAL SAC

### 3-PARTES

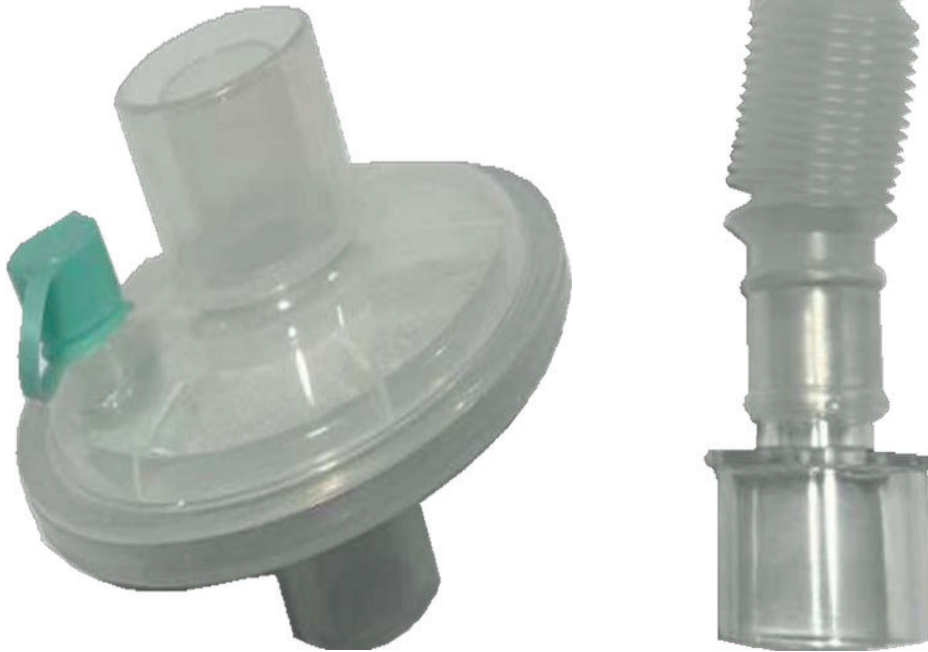

### 4- INSTRUCCIÓN DE USO

Abra el paquete arrancando desde el borde inferior.  
Conecte de forma segura el producto a otros componentes o máquinas utilizando una acción de torsión para garantizar un ajuste hermético y sin fugas.  
Asegúrese de que el puerto de muestreo de gas esté cerrado cuando no esté conectado a la línea de monitoreo.  
El paciente debe ser monitoreado constantemente cada vez que se usa el producto.  
El tiempo máximo recomendado de uso del producto es de hasta 24 horas.



## **5-PRECAUSIONES Y ADVERTENCIAS**

Por favor lea las instrucciones antes de usar.  
Compruebe la integridad del paquete del producto. No utilice el producto si el paquete está dañado.

Debe ser utilizado según las indicaciones del médico.

Dispositivo de un solo uso para ser utilizado en un solo paciente, deséchelo después de usarlo de acuerdo con las regulaciones aplicables o nacionales para desechos biológicamente peligrosos

### **1. PRESENTACION:**

- Caja de cartón conteniendo 100 unidades,

### **2. ALMACENAMIENTO:**

- Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura menor a 30°C.

### **3. CONDICION BIOLOGICA:**

- Producto Estéril .

### **4. VIDA UTIL:**

- 03 años, desde la fecha de fabricación.

### **10 FABRICANTE:**

- Shandong Mingyue Medical Technology Co., Ltd

HOUSE MEDICAL SAC  
  
Cesar J. Ochoa Rodríguez  
DIRECTOR TÉCNICO  
CQPP - 02960