



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: **FILTRO ANTIBACTERIAL+INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD**

MODELO: **MY-RGB-Z-C**

MARCA COMERCIAL: **VENOMEDIC.**

REGISTRO SANITARIO: **DM31105E**

1. DESCRIPCION:

Los filtros HME tienen un papel esencial en los pacientes sometidos a ventilación mecánica reduciendo el riesgo de contaminación cruzada .

El uso de filtros protege a los pacientes, al prevenir la inhalación de patógenos dañinos, ayuda a proteger los ventiladores de la contaminación con bacterias y virus y ayuda a prevenir la propagación de la infección en el ambiente hospitalario

2. CARACTERISTICAS:

Descripción	Filtro intercambiador de calor y humedad (HME)
	*Filtro intercambiador de calor y humedad (HME) con Catéter mount
Material	Carcasa de ABS, membrana filtrante de polipropileno electrostático, membrana higroscópica de fibra de algodón + PE
Retorno de humedad	31mg/H ₂ O @ VT 500ml
Eficiencia de filtración	99.999% (Eficacia de filtración bacterial) BFE
	99.99% (Eficacia de filtración viral).VFE
Resistencia @ 60 LPM	≤2.5cm H ₂ O (≤ 0.245 kPa)
Espacio muerto del filtro	45ml
Rango de Volumen Tidal	150-1500ml
Conectores	22M/15F-22F/15M
Peso	Del filtro: 28gr, (+/- 3g)
	Del corrugado: 16g (+/-3g)
Puerto de Monitoreo Luer de CO ₂	Si
*Catéter mount (Corrugado)	Tubo plegable
*Conector para catéter mount	22M/15F-22F

3-PARTES FILTRO ANTIBACTERIAL BIRAL +INTERCAMBAIDOR DE CALOR HUMEDAD



4- INSTRUCCIÓN DE USO

- Abra el paquete arrancando desde el borde inferior , conecte de forma segura el producto a otros componentes o maquina utilizando una acción de torsión para garantizar un ajuste hermético y sin fugas
- Asegúrese de que el puerto del muestreo de gas este cerrado cuando no este conectado a al línea de monitoreo
- El paciente debe ser monitoreado constantemente cada vez que se usa el producto
- El tiempo máximo recomendado de uso del producto es hasta 24 horas

1. PRESENTACION:

- Caja de cartón conteniendo 100 unidades,

2. ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura menor a 30°C.

3. CONDICION BIOLOGICA:

- Producto Estéril .

4. VIDA UTIL:

- 03 años, desde la fecha de fabricación.

10 FABRICANTE:

- Shandong Mingyue Medical Technology Co., Ltd

HOUSE MEDICAL SAC

Cesar J. Ochoa Rodríguez
DIRECTOR TÉCNICO
CQPP - 00968



HOUSE MEDICAL SAC